

LUFT3 AP





Manual DE USUARIO

Antes de operar este equipo lea atentamente el manual de usuario para un uso seguro y eficaz del ventilador para cuidados intensivos modelo Luft 3 AP


ENSAMBLE

1

Establecer la orientación de la columna comprendiendo que, el lado que debe ir hacia abajo lo indica el tope del soporte del Termohumidificador.

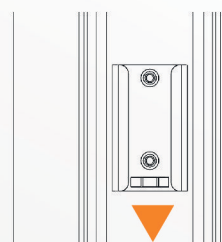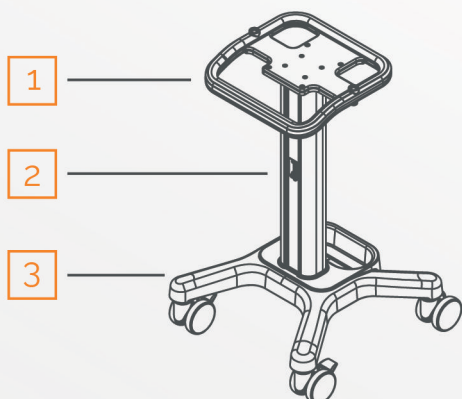


Este lado
hacia abajo

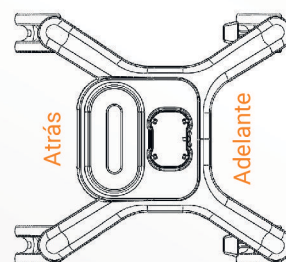


2

Posicionar la columna sobre el pedestal orientando hacia el frente de la base el soporte del Termohumidificador, y calzar la columna sobre la base en la zona de columna que contiene la forma de ésta.

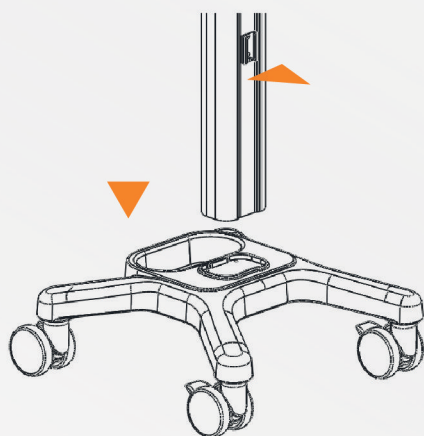


3

Sosteniendo la columna y con cuidado de que no caiga al suelo, colocar los tornillos por debajo de la base.

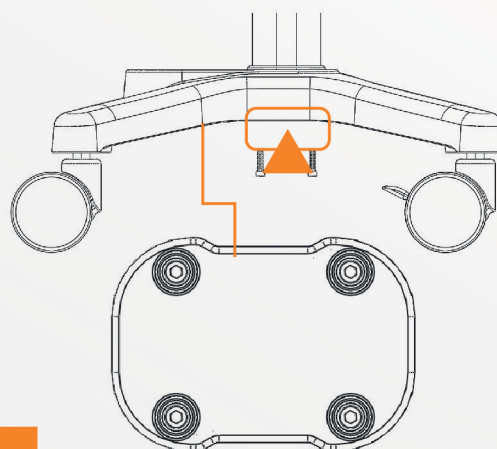

Ensamble

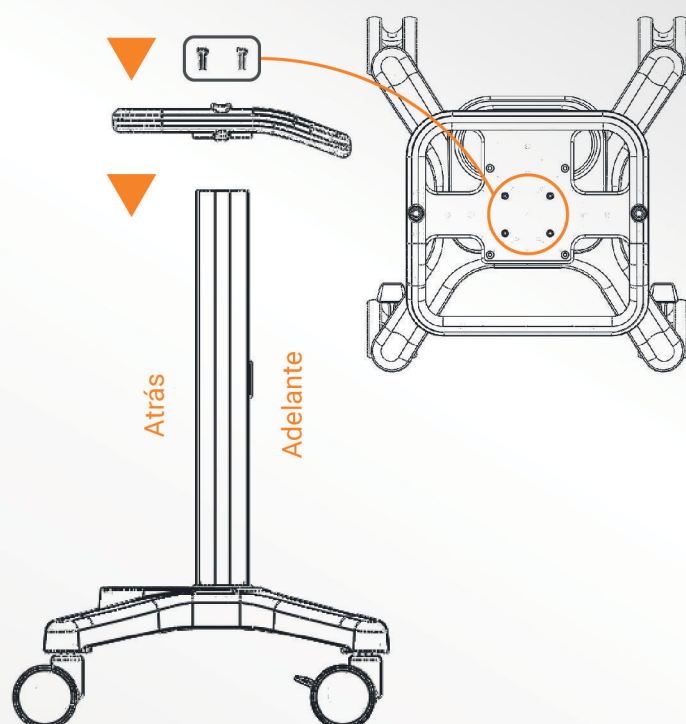


4

Posicionar el agarre 360° sobre la columna del pedestal, teniendo en cuenta la orientación del mismo, una vez posicionado colocar los cuatro tornillos por encima del agarre para fijarlo.

5

Con el pedestal ensamblado completamente, posicionar el equipo encima, hacer coincidir los orificios del pedestal con los del equipo y desde la parte inferior del agarre 360°, colocar los 4 tornillos y fijar el pedestal y equipo.

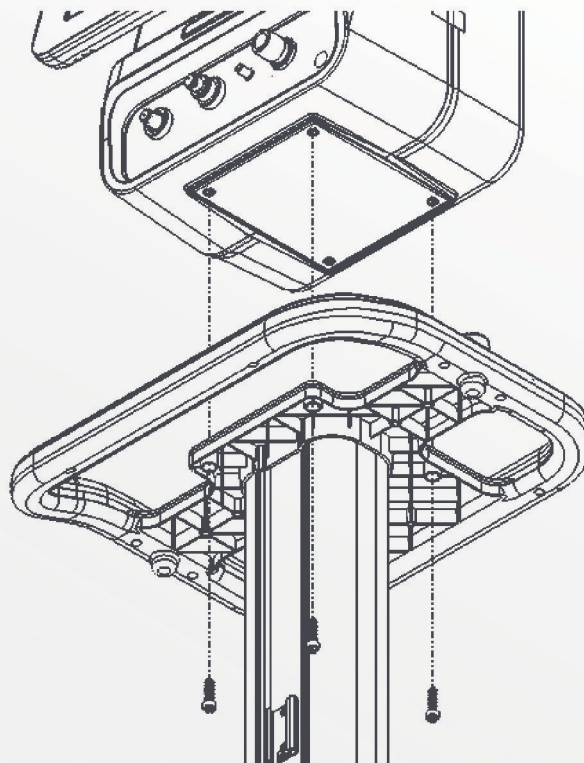

- Lea atentamente los capítulo 1 y 2 del manual de usuario.

Capítulo 1: Advertencias, precauciones y notas

Capítulo 2: Especificaciones

Capítulo 3: Armado y Conexión:

Calibración de pantalla táctil



1 Encender el equipo


2 El botón de calibración de la pantalla táctil se encuentra en la parte posterior del equipo

3

Al presionar el botón, en la pantalla, se visualiza una cruz de color amarillo con unas coordenadas al pie. Se debe mantener presionada durante 4" hasta que aparezca otra cruz amarilla en diagonal e inferior a esta. La cruz superior se torna de color verde.

4

Se debe mantener presionado durante 4" sobre la cruz amarilla inferior hasta que se torne color verde. El procedimiento se da por finalizado.

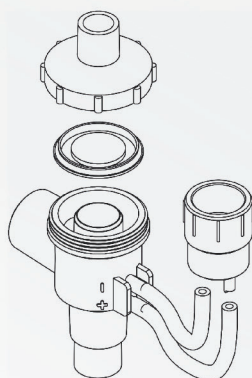

Armado de válvula
espiratoria




Conexión del
cableado



Conexión de filtro con
trampa de agua en
la entrada de aire
del equipo

Capítulo 4: Instrucción de Operación

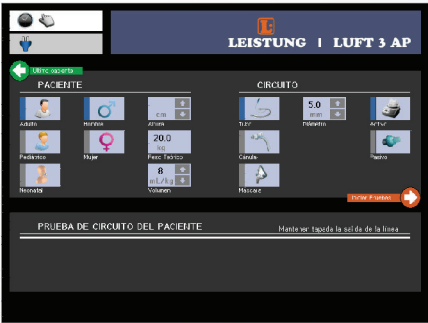

Pantalla de Inicio
La misma permite seleccionar el tipo de paciente a ventilar (adulto o pediátrico), sexo (hombre o mujer), altura y volumen por kg

Pantalla Principal

Panel de Iconos

Área de Información

Área de monitoreo dinámico y configuración de alarmas

Área de ajustes

Área de señales de alarma

Panel de accesos directos y menú

Controles de Selección

Panel de Acceso Directo y Menú

Nebulizador

O₂ Oxígeno 100%

Disparo Manual

Pausa Inspiratoria

Pausa Espiratoria

Sensibilidad Espiratoria

Congelar Gráficos

CO₂ Detectar Capnografía

MENÚ

ÁREA DE MENÚ PRINCIPAL

Al presionar sobre la palabra “Menú”, se desliza la ventana del **MENÚ PRINCIPAL**, donde se encuentran las siguientes 6 opciones. Se debe presionar sobre la opción deseada. Transcurridos 10 segundos, el menú se oculta.

MODOS VENTILATORIOS	
- VCV	- VNI
- PCV	- MMV+PSV
- PSV/CPAP	- PSV+VT ASEGURADO
- PRVC	- BIFÁSICO
- SIMV (VCV)+PSV	- TERAPIA O ₂
- SIMV (PCV)+PSV	
MECÁNICA VENTILATORIA	
- Auto PEEP	- Índice de Estrés
- Complacencia - Resistencia	- Pausa Inspiratoria
- Curva PV Bajo Flujo	- Trabajo Inspiratorio
- P0.1	- Constante de tiempo inspiratorio
- Índice de Tobin	- Capacidad Vital Lenta
	- Porcentaje de fugas
GRÁFICOS	
- De 1 a 5 Curvas	
- Escala/Tiempo	
MONITOREO REMOTO	
- Historial de Alarma/Evento	
- Tendencias	
- Mecánica Ventilatoria	
- Complacencia Línea	
CONFIGURACIÓN FUNCIONAL	
- Alarma PEEP	
- TGI	
- Suspiros	
- Cambio/Prueba de Circuito	
- Paciente	
CONFIGURACIÓN OPERATIVA	
- Mantenimiento	
- Idioma	
- Compensación Altitud	
- Fecha/Hora	
- Nivel Sonido	



LEISTUNG

Bv. Los Venecianos 6595
Córdoba (X5022RWT)
Tel: +54 0351 4759112/15

Pasteur 721,
Capital Federal (C1028AAO)
Tel: +54 011 49542339

COMERCIO NACIONAL
Tel: +54 0351 4759112/15 Int.1 /211
ventas@leistungargentina.com.ar

COMERCIO EXTERIOR
Tel: +1 786 326 3936
sales@leistung-usa.com

ASISTENCIA TÉCNICA

|  +54 9 351 238 3134
asistencia@leistungargentina.com.ar

info@leistungargentina.com.ar
www.leistungargentina.com.ar