


Ventilador para transporte PR4 G

Guía rápida de encendido y armado

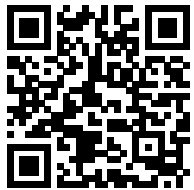

MANUAL DE USUARIO

Antes de operar el equipo, escanee el código QR para descargar el manual de usuario y lea atentamente el mismo para un uso seguro y eficaz del ventilador de transporte PR4 G



Fijado y conexión

FIJACIÓN DEL EQUIPO




Soporte con perforaciones para fijación



El ventilador PR4G se vincula al soporte por 2 tornillos de fijación que se enroscan en los laterales del equipo.


VISTA INFERIOR DEL EQUIPO

1. Entrada de oxígeno medicinal
2. Salida de escape de gases
3. Válvula espiratoria
4. Circuito paciente
5. Interruptor encendido/apagado
6. Entrada eléctrica
7. Fusible
8. Filtro de aire

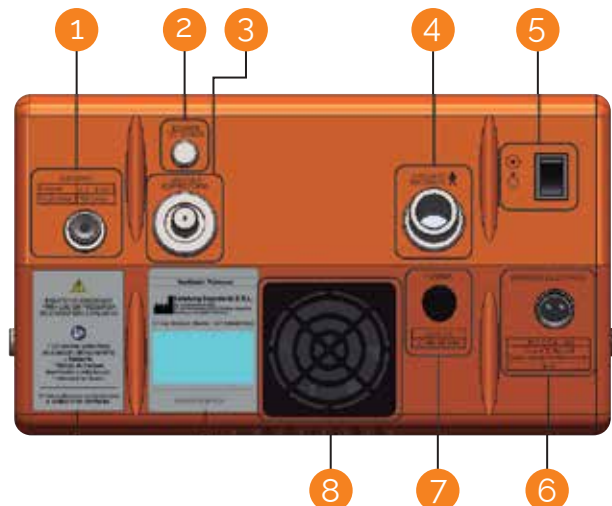

ARMADO Y CONEXIÓN DE LA VÁLVULA ESPIRATORIA

1. Colocar el diafragma en el labio interior de la tapa, respetando el lado indicado en la figura.
2. Para verificar su correcta fijación, sostener la tapa con el diafragma hacia abajo. En caso de que el diafragma se suelte, existe un mal posicionamiento del mismo.
3. Roscar la tapa en el cuerpo. Cuando se llegue al final de rosca, ajustar en forma suave.
4. Verificar que el diafragma esté correctamente centrado.

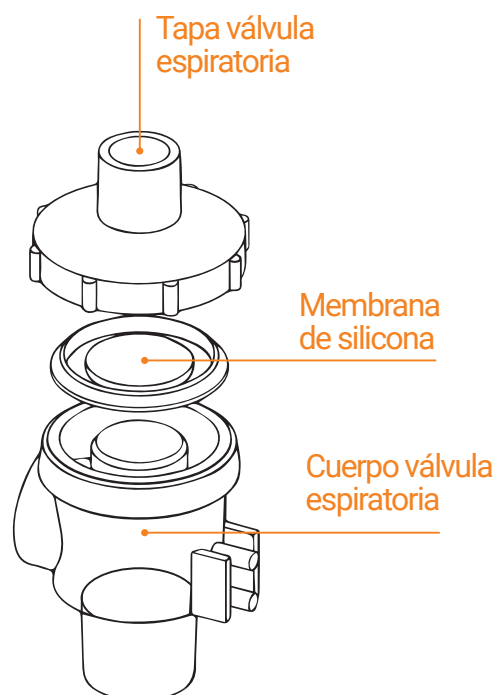


Indicadores y controles

AUTOTEST INICIAL

Al encender el ventilador, mediante el interruptor ENCENDIDO/APAGADO, el equipo realiza las pruebas automáticas iniciales: puesta a cero de los sensores de presión y compensación de la densidad de gases.

PANTALLA DE INICIO

Permite seleccionar el tipo de paciente a ventilar: adulto, pediátrico o neonatal.

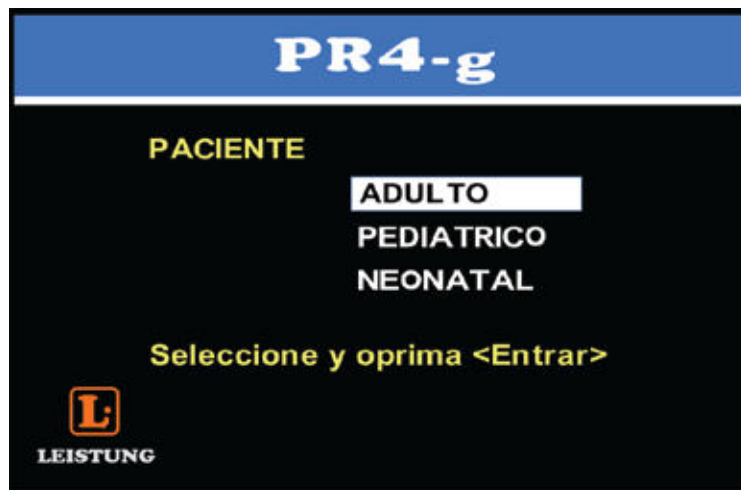


PANEL FRONTAL

Área de monitoreo y ajustes de alarmas

Área de Modo Ventilatorio

Área de Íconos

Área de gráficos y funciones

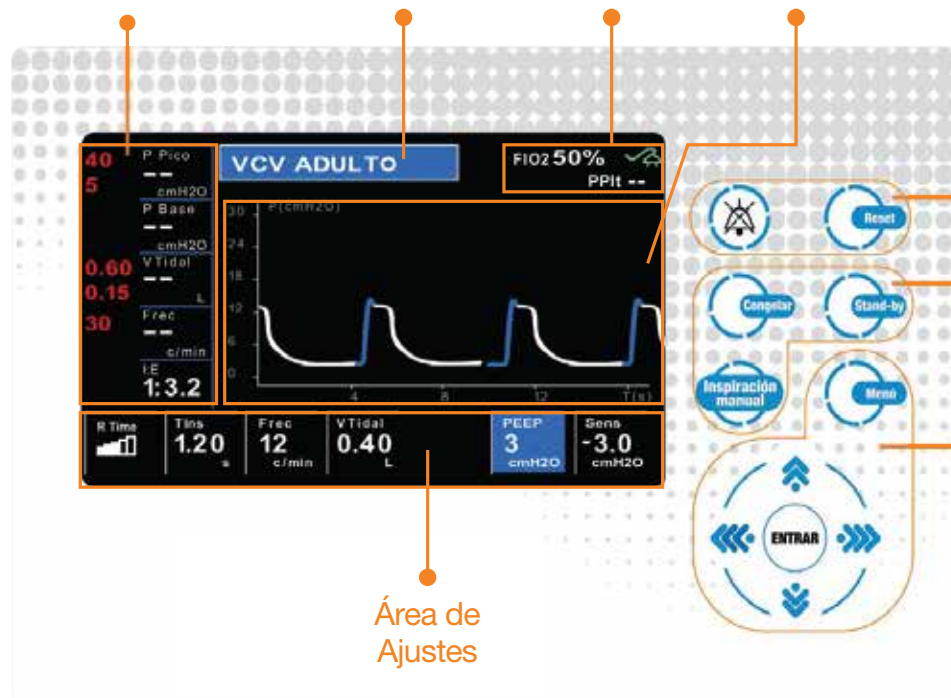

Funciones de alarmas

Funciones de acceso directo

Área de controles

Área de Ajustes

LEISTUNG

Bv. Los Venecianos 6595
Córdoba (X5022RWT)
Tel: +54 0351 4759112/15 Int. 1/211
ventas@leistungargentina.com.ar

Pasteur 721
Capital Federal (C1028AAO)
Tel.: +54 011 49542339

COMERCIO NACIONAL

Tel.: +54 0351 4759112/15 Int. 1/211
ventas@leistungargentina.com.ar

COMERCIO EXTERIOR

Cel.: +1 786 326 3936
sales@leistung-usa.com

ASISTENCIA TÉCNICA

☎ +54 9 351 238 3134
asistencia@leistungargentina.com.ar

info@leistungargentina.com.ar

www.leistungargentina.com.ar

