

PR5 TT

Guía rápida de encendido y armado




MANUAL DE USUARIO

Antes de operar el equipo, escanee el código QR para descargar el manual de usuario y lea atentamente el mismo para un uso seguro y eficaz del ventilador de alta complejidad PR5 TT

LEISTUNG

Identificación de componentes, accesorios y partes

VISTA LATERAL DERECHA

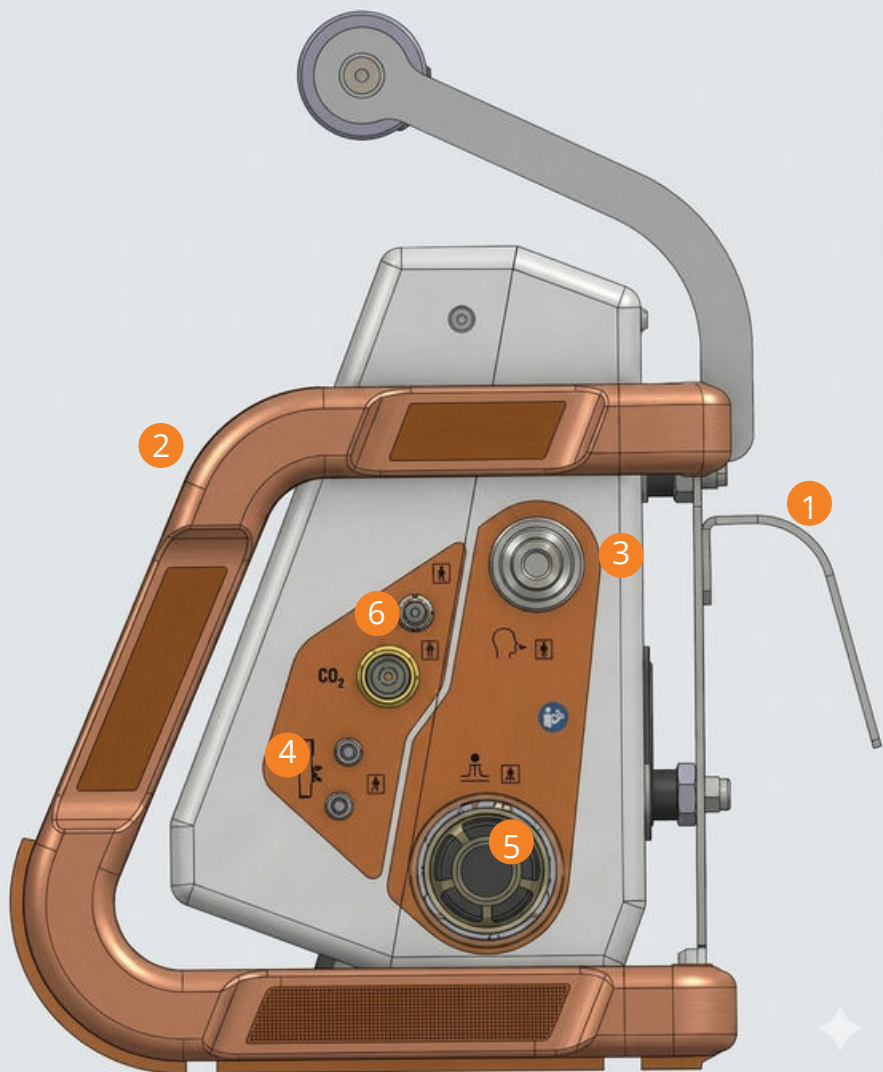


1. Soporte para camilla
2. Protección lateral derecha
3. Conector salida paciente
4. Conectores para sensor del flujo proximal
5. Conector para válvula espiratoria
6. Conector capnografía

VISTA LATERAL IZQUIERDA



- 7. Protección lateral izquierda
- 8. Conector para suministro de O₂
- 9. Filtro de aire externo
- 10. Conector de alimentación eléctrica
- 11. Conector hembra para entrada de LPO (Low Pressure Oxygen)
- 12. Botón encendido / apagado

VISTA INFERIOR

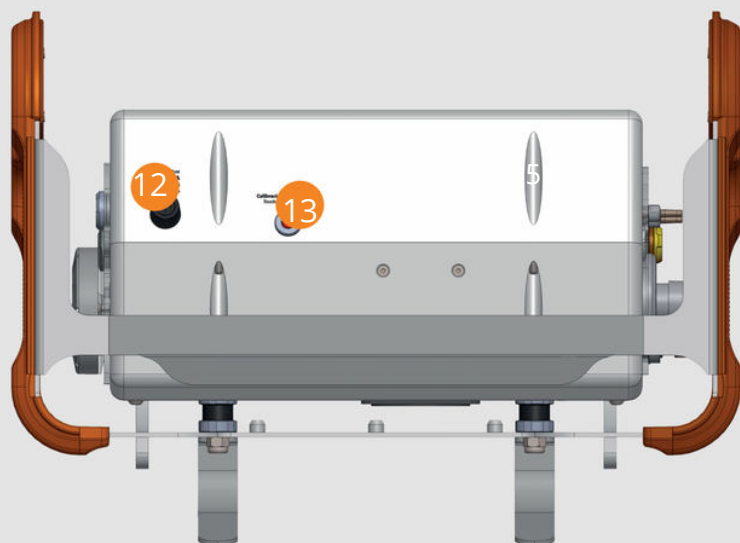


- 12. Portafusible
- 13. Botón calibración de pantalla táctil

Conexiones del equipo

Conexión del filtro de aire externo

Paso 1

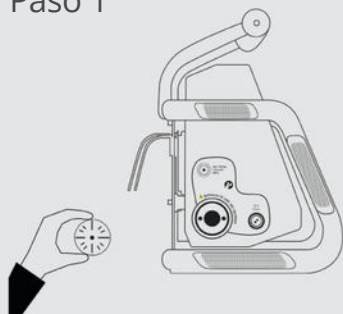


Desenroscar la
tapa del filtro

Paso 2




Quitar el filtro
del envoltorio

Paso 3

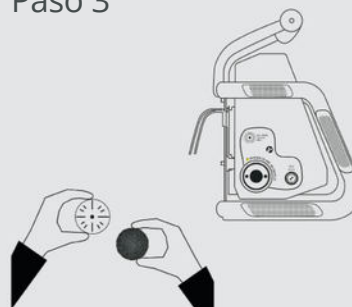


Colocar el filtro
en la tapa

Paso 4

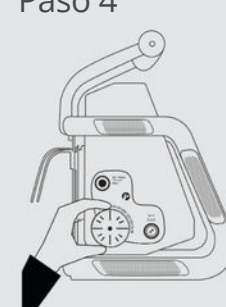

Roscar la tapa
con el filtro

Conexión de la Válvula espiratoria

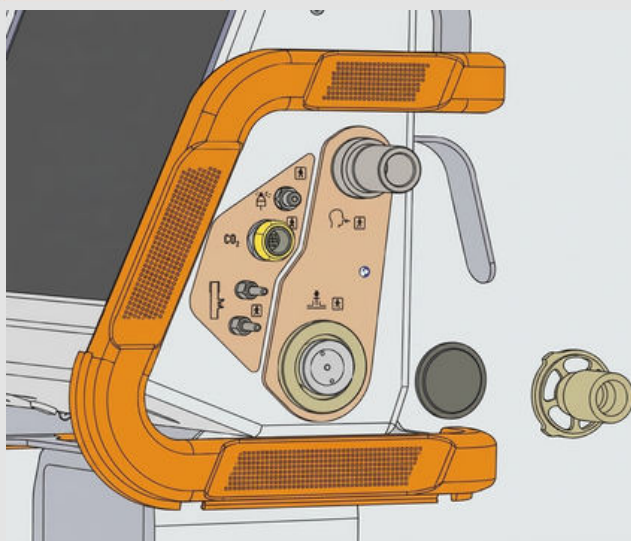

1. Colocar y asegurar un perfecto encaسته del diafragma en la tapa presente en el panel lateral.
2. Posicionar el cuerpo de la válvula sobre la tapa, ejerciendo una pequeña presión sobre la membrana de manera que coincidan las tres aletas del cuerpo con sus respectivos alojamientos en la tapa del panel.
3. Roscar en sentido horario hasta que llegue al tope. El ajuste debe ser suave.


Conexión del circuito respiratorio

Circuito respiratorio de dos ramas

Conectar la rama inspiratoria en el conector salida paciente y la rama espiratoria en la válvula espiratoria



Esquema de conexión de accesorios

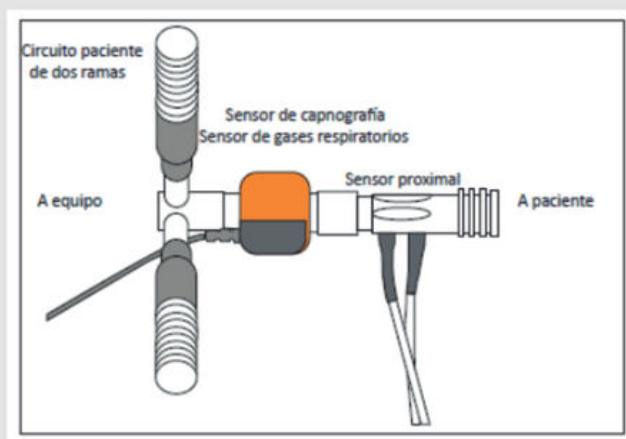

PANTALLA DE INICIO

Permite seleccionar el tipo de paciente a ventilar (adulto, pediátrico y neonatal), sexo, altura, peso teórico, y volumen ventilatorio por kilogramo. También se puede seleccionar el tipo de interfaz del paciente y sus dimensiones.

31

LEISTUNG

Ultimo paciente

PACIENTE

Adulto

Hombre

165 cm

Altura

Pediátrico

Mujer

61.4 kg

Peso Teórico

Neonatal

8 mL/kg

Volumen

CIRCUITO

Tubo

8.0 mm

Diámetro

100 L/min

Cánula

320 mm

Longitud

30 L/min

Máscara

Sin Sensor

Iniciar

PANTALLA PRINCIPAL





Bv. Los Venecianos 6595
Córdoba (X5022RWT)
Tel: +54 0351 4759112 Int. 1/211
ventas@leistungargentina.com.ar

COMERCIO NACIONAL

Tel.: +54 0351 4759112 Int. 1/211
ventas@leistungargentina.com.ar

COMERCIO EXTERIOR

Cel.: +1 786 326 3936
sales@leistung-usa.com

ASISTENCIA TÉCNICA

+54 9 351 238 3134
asistencia@leistungargentina.com.ar

info@leistungargentina.com.ar

www.leistungargentina.com.ar

